



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BLORA**  
**RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)  
421026 Fax: 424373  
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
CEPU - 58311

**PROSEDUR PENGOPERASIAN  
SHORT WAVE DIATHERMY (SWD)**

No. Dokumen:  
010.14 / 580.  
P/14/2022

No. Revisi:  
01

Halaman:  
1 dari 1

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit :  
  
10 Januari 2022

Ditetapkan,  
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto  
Kabupaten Blora

  
dr. FATKHUR ROKHIM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19720101 200212 1 013

**PENGERTIAN**

Short wave diathermy (SWD) adalah modalitas fisioterapi yang menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 27,12 MHz dengan panjang gelombang 11m.

**TUJUAN**

Sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian pelayanan fisioterapi dengan modalitas short wave diathermy (SWD).

**KEBIJAKAN**

Surat Keputusan Direktur ..... tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi

**PROSEDUR**

1. Hubungkan kabel power pada stop kontak listrik.
2. Pasang elektroda pada area yang sakit (bebaskan area dari logam)
3. Putar tombol "ON" hingga lampu indikator menyala hijau
4. Putar tombol "TIMER" untuk mengatur lamanya waktu terapi
5. Putar tombol "INTENSITAS" sesuai toleransi ambang rasa pasien
6. Matikan alat dengan menekan tombol "OFF".

**UNIT TERKAIT**

Instalasi Fisioterapi