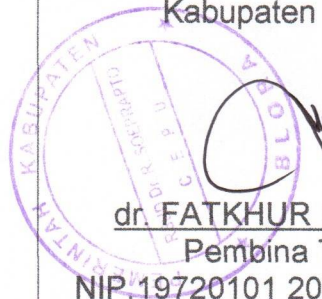
 <p> PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311 </p>	PROSEDUR PENGOPERASIAN ULTRASOUND (US)		
	No. Dokumen: <i>010.16/SPO.P/yn/</i> <i>2022</i>	No. Revisi: 01	Halaman: 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 10 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora  <u>dr. FATKHUR ROKHIM</u> Pembina Tk. I NIP. 19720101 200212 1 013	
PENGERTIAN	Ultrasound [US] adalah modalitas fisioterapi dengan menggunakan getaran mekanik gelombang suara dengan frekuensi 0,5-5 MHz untuk menimbulkan efek terapeutik.		
TUJUAN	Sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian pelayanan fisioterapi dengan modalitas Ultrasound.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungkan kabel power pada stop kontak listrik 2. Hidupkan alat dengan menekan tombol "ON" 3. Persiapan pasien, berikan jel pada area yang akan di terapi 4. Tekan load program 5. Pilih diagnosa 6. Atur 'TIMER' 7. Tekan continus emis / otomatis untuk mengatur intensitas yang di butuhkan 8. Tekan tombol start dan alat siap di gunakan 9. Jika pemberian terapi selesai, tekan saklar "POWER" posisi off 10. Cabut power pada stopkontak 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Fisioterapi		