



PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

PROSEDUR PENGOPERASIAN
MICRO WAVE DIATHERMY (MWD)

No. Dokumen:
010/17/590/PIYD/
2022

No. Revisi:
01

Halaman:
1 dari 1

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit :
10 Januari 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora

dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Micro wave diathermy adalah modalitas fisioterapi dengan menggunakan panjang gelombang 12,25 dengan arus 50 HZ.

TUJUAN

Sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian pelayanan fisioterapi dengan modalitas micro wave diathermy (MWD)

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi

PROSEDUR

1. Hubungkan kabel power pada stop kontak listrik
2. Hidupkan alat dengan menekan tombol "ON"
3. Pasang pad pada area yang akan di terapi
4. Tekan **continus**
5. Tekan **konfirmasi**
6. Atur 'TIMER'
7. Tekan aut power untuk mengatur intensitas dan alat siap di gunakan
8. Jika pemberian terapi selesai, tekan saklar "**POWER**" posisi off
9. Cabut power pada stopkontak

UNIT TERKAIT

Instalasi Fisioterapi