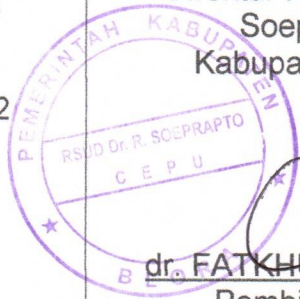
 <p> PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311 </p>	PROSEDUR PENGOPERASIAN TENS (TRANSCUTANEOUS ELECTRICAL NERVE STIMULATION)		
	No. Dokumen: <i>010-18/5 PO. Plyn/ 2022</i>	No. Revisi: 01	Halaman: 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 10 Januari 2022	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora  dr. FATKHUR ROKHIM Pembina Tk. I NIP. 19720101 200212 1 013	
PENGERTIAN	TENS adalah modalitas fisioterapi yang menggunakan arus listrik amplitude 50mA dengan frekuensi 10-250Hz		
TUJUAN	Sebagai petunjuk pelaksanaan pemberian pelayanan fisioterapi dengan modalitas TENS		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Fisioterapi		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungkan kabel power pada stop kontak listrik 2. Hidupkan alat dengan menekan tombol "ON" 3. Pasang pad pada area yang akan di terapi 4. Tekan tombol manual [MAN] 5. Tekan pilih TENS [POLA] 6. Atur 'TIMER' 7. Atur intensitas dan alat siap di gunakan 8. Jika pemberian terapi selesai, tekan saklar "POWER" posisi off 9. Cabut power pada stopkontak 		
UNIT TERKAIT	Instalasi Fisioterapi		