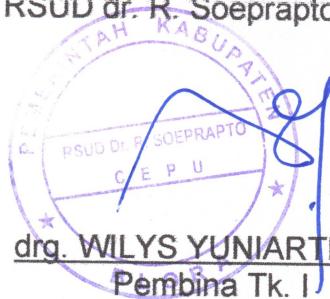
 <p> PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373 Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311 </p>	PERSIAPAN MESIN HEMODIALISA		
	No. Dokumen : 025/SPO.HDN/2024	No. Revisi : 0	Halaman : 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 8 Mei 2024	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu  <u>drg. WILYS YUNIARTI, MM</u> Pembina Tk. I NIP. 19790625 200501 2 016	
Pengertian	Suatu tindakan untuk mempersiapkan mesin agar siap pakai untuk digunakan pada saat Hemodialisa		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mencegah masalah yang terjadi selama hemodialisis berlangsung. 2. Proses hemodialisis berjalan lancar. 3. Mengoptimalkan mesin hemodialisis. 		
Kebijakan	Surat Keputusan Direktur No. 800/39/II/2024 tentang Pedoman Pelayanan Unit Dialisis RSUD dr. R. Soeprapto Cepu		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka kran air yang telah dihubungkan ke mesin hemodialisis. 2. Memastikan selang pembuangan air dari mesin hemodialisis ke saluran pembuangan. 3. Menghidupkan mesin hemodialisis. 4. Menyambung selang dialisat ke jerigen acid (merah) dan ke jerigen bikarbonat (biru). 5. Mengunggu Self test sampai dengan selesai. 6. Mesin siap dipakai 		
Unit Terkait	-		