



**PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU**  
Jl. Ronggolawe 50  
Telp. (0296) 421026 Fax: 424373  
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com  
CEPU – 58311

## PERAWATAN MESIN HEMODIALISIS

No. Dokumen :  
034/SPO.HD/V/2024


No. Revisi :  
0

Halaman :  
1 dari 1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit  
8 Mei 2024

Ditetapkan,  
Direktur  
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

  
drg. WILYS YUNIARTI, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19790625 200501 2 016

#### Pengertian

Suatu tindakan yang dilakukan / diberikan terhadap mesin HD segera setelah selesai digunakan.

#### Tujuan

Agar mesin dapat digunakan tanpa mengalami penyulit yang menghambat proses HD berlangsung ( mesin siap pakai ).

#### Kebijakan

Surat Keputusan Direktur No. 800/39/II/2024 tentang Pedoman Pelayanan Unit Dialisis RSUD dr. R. Soeprapto Cepu

#### Prosedur

A. Bagian Luar Mesin  
Setiap selesai digunakan / dipakai harus dibersihkan dengan menggunakan lap basah dan lap kering. Bisa dilakukan sehari 1 kali atau lebih bila mesin kelihatan kotor, adanya bekas darah yang menempel di mesin HD .

B. Bagian Dalam Mesin  
Jenis Larutan Disinfektan yang digunakan :  
Citrid Acid / Asam Cuka 5 %

**Cara melakukan desinfektan mesin :**  
Setelah selesai mesin digunakan tekan tombol pada mesin sebagai berikut :

- Sentuh tombol RETURN
- Pilih tombol RINSE, CHEM DISC atau HOT DISC
- Tombol RINSE untuk membilas mesin sementara pada waktu mesin akan segera digunakan kembali, missal dari shift pagi ke shift sore
- Tombol CHEM DISC untuk disinfeksi mesin dengan cairan citrid acid, digunakan sehari sekali setelah shift sore
- Tombol HOT DISC untuk disinfeksi mesin dengan cairan citrid acid disertai pemanasan, digunakan seminggu sekali yaitu akhir shift siang hari Sabtu

#### Unit Terkait

-